



Masque barrière UNS1 réutilisable à filtre jetable



MADE IN FRANCE

IMPORTANT : CE DISPOSITIF N'EST NI UN DISPOSITIF MÉDICAL AU SENS DU RÈGLEMENT UE/2017/745 (MASQUES CHIRURGICAUX), NI UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU SENS DU RÈGLEMENT UE/2016/425 (MASQUES FILTRANTS DE TYPE FFP2). L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION, LAVAGE ET/OU CHANGEMENT DE FILTRE. LE MASQUE SI-MASK™ N'EXONÈRE PAS L'UTILISATEUR DE L'APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES, DES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE ET DES CONSIGNES SANITAIRES MISES EN PLACE.

Avertissements :

1. Le port de barbe ainsi que certains traits de morphologie du visage risque de réduire l'efficacité du masque.
2. Enlevez le masque, quittez le lieu de travail et retournez à l'air frais si vous avez des difficultés à respirer ou ressentez des vertiges et d'autres troubles lors du port du masque.
3. Respectez scrupuleusement le temps indiqué d'utilisation, le temps d'utilisation du filtre et la procédure de nettoyage du masque. Ne pas utiliser de produit abrasif pour le nettoyage.
4. Jetez le filtre dans une poubelle adaptée. Ne pas jeter sur la voie publique.
5. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.
6. Ne pas jeter le sachet ZIP fourni avec le masque, il est également réutilisable et permet de conserver votre masque après lavage.
7. Utilisez ce masque dans des endroits correctement ventilés, contenant suffisamment d'oxygène.
8. Ne pas utiliser ce masque comme un équipement de protection individuel.
9. Ne pas utiliser en présence de produits toxiques ou chimiques.
10. Respectez le principe de l'usage unique du filtre. Ne pas essayer de nettoyer un filtre.
11. Ne pas congeler.
12. Ne pas effectuer d'activité physique intense lorsque vous portez le masque.
13. Le masque Si-Mask™ n'exonère pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières, des mesures de distanciation sociale et des consignes sanitaires mises en place.
14. Afin d'éviter tous risques de blessures, respectez scrupuleusement les instructions de montage du filtre et des sangles.
15. Le masque Si-Mask™ constitue une solution palliative à la pénurie de masque dans le contexte de lutte contre le COVID-19.
16. Ne coupez pas les sangles.
17. Avant la première utilisation, inspectez le masque, vérifiez la présence de tous les composants et nettoyez le masque suivant la méthode 3 de nettoyage. Une fois le masque propre et sec, mettez en place un filtre avant utilisation.
18. Lisez entièrement la notice avant toutes utilisations.
19. Le masque est livré avec le kit « tour de tête » monté. Un autre kit (« tour d'oreille ») est disponible avec votre masque suivant votre préférence.
20. N'utilisez pas le masque sans filtre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser un filtre différent que celui proposé.
21. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 12 ans.
22. Ne pas dormir avec le masque.
23. Le bloque-filtre translucide s'utilise seulement avec le porte filtre translucide.

EN NE RESPECTANT PAS TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LIMITATIONS INDIQUÉES POUR CE PRODUIT, VOUS RISQUEZ D'EMPÊCHER LE MASQUE DE FONCTIONNER CORRECTEMENT ET DE METTRE EN DANGER VOTRE SANTÉ.

Constitution et matériaux :

Code produit	Désignation	Matériau / Couleur	Qte	Fabricant
18548	Demi-masque	Silicone bleu	1	
18633	Kit porte-filtre coton Si-Mask™	1 porte filtre + 1 rondelle en silicone translucide	1	
18534	Kit de sangles « Tour de tête »	3 sangles en silicone gris + 1 bride de réglage en silicone bleu	1	
18535	Kit de sangles « Tour d'oreille »	2 sangles en silicone bleu	1	
18557	Rondelle bloque-filtre	Silicone gris	1	
NA	Filtre Coton	60% Coton 20% microfibre polyester 20% polyester	20	Disque à démaquiller extra doux avec microfibres marque CIEN (140 unités) Lidl France S.N.C
NA	Sachet ZIP	PE 100µm	1	Raja FRANCE

Caractéristiques et utilisation :

Dans le cadre de la crise sanitaire, Si-Mask™ s'inscrit dans les initiatives de lutte contre le COVID-19. Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires. Si-Mask™ est catégorisé UNS1 (Usages Non Sanitaires catégorie 1) suivant la note interministérielle datée du 29 mars 2020 (testé par un laboratoire indépendant). Les filtres proposés permettent une filtration de plus de 90% et une excellente respirabilité. Il répond également à l'AFNOR spec S76-001 V1.10 pour les points applicables. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. Son utilisation s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Si-Mask™ est individuel et proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Le masque Si-Mask™ répond à un besoin pour des personnes non directement exposées aux virus, en association et en complément de l'application stricte des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Il est conseillé toutes les 4h de quitter le masque à minima 1h. Les pièces en silicone sont lavables et peuvent être utilisées de multiples fois après nettoyage. Le nettoyage doit être réalisé suivant le protocole propre à ce produit décrit ci-après. Les filtres en coton sont jetables et permettent une utilisation du masque 4 heures maximum. Au-delà de ce temps, il convient de le remplacer en respectant la procédure de changement de filtre ci-après. Les tests au porter pendant 4h ont été réalisés par le fabricant. 20 filtres en coton sont livrés avec le masque. Un réapprovisionnement en disques de coton est nécessaire et doit être effectué par l'acheteur. La marque et le lieu d'achat sont donnés dans le tableau ci-dessus.

UN FILTRE NEUF = 4H D'UTILISATION. APRÈS CE TEMPS, CHANGEZ DE FILTRE

Nettoyage des masques Si-Mask™ :

LAVEZ-VOUS LES MAINS AVANT CHAQUE MANIPULATION DU MASQUE À L'AIDE D'EAU ET SAVON, DE GEL HYDROALCOOLIQUE OU D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70°. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LES MAINS PROPRES ET SÈCHES.

Seules les pièces en silicone constituant le masque sont lavables et réutilisables. Les filtres sont utilisables durant 4 heures et sont jetables et non nettoyables après utilisation. 3 méthodes de nettoyage sont préconisées ci-après en fonction de votre lieu et matériel disponible sur le moment. Les méthodes 1 et 2 sont préconisées lors de changement de filtre en pleine journée ou lorsque vous n'êtes pas chez vous. Il est recommandé de réaliser un nettoyage suivant la méthode 3 régulièrement. Une fois nettoyées, les parties du masque réutilisables doivent être rangées dans leur sachet ZIP si elles ne sont pas utilisées.

NE PAS CHANGER DE METHODE OU DE PRODUIT DE NETTOYAGE. LAISSER BIEN SECHER AVANT UTILISATION. NE PAS METTRE AU MICRO-ONDE.

- Méthode 1 : nettoyage à l'aide d'alcool isopropylique.

1. Trempez votre masque, sangles et rondelles dans de l'alcool isopropylique 70°.
2. Laissez agir 2 minutes.
3. Sortez le masque. Essayez l'excédent d'alcool à l'aide d'une lingette propre et non pelucheuse.
4. Laissez sécher à l'air libre 15 minutes minimum avant réutilisation.

Nota : l'alcool isopropylique peut être sprayé. Le sachet ZIP de transport peut être nettoyé intérieur et extérieur en suivant cette méthode.

- Méthode 2 : nettoyage à l'aide de gel hydroalcoolique.

1. Déposez directement le gel hydroalcoolique sur les surfaces internes et externes du masque, sangles et rondelles.
2. Frictionnez après dépose avec vos mains le gel sur les pièces en silicone.
3. Essayez l'excédent d'alcool à l'aide d'une lingette propre et non pelucheuse.
4. Laissez sécher à l'air libre 15 minutes minimum avant réutilisation.

Nota : le sachet ZIP de transport peut être nettoyé intérieur et extérieur en suivant cette méthode.

- Méthode 3 : Stérilisation à l'eau chaude.

ATTENTION LA METHODE SUIVANTE COMPORTE DES RISQUES DE BRULURE. MANIPULEZ LES OBJETS CHAUDS AVEC PRECAUTION.




1. Choisissez une casserole ou une marmite permettant de contenir les objets.
2. Remplissez le récipient d'eau. Portez à ébullition à feu vif.
3. Plongez le masque, les sangles et les rondelles dans l'eau bouillante à l'aide d'une pince.
4. Laissez bouillir pendant 5 minutes.
5. Sortez les produits à l'aide d'une pince et déposez sur un papier absorbant.
6. Attendez 15 minutes minimum avant de pouvoir réutiliser le masque

Nota : le sachet ZIP ne doit pas être nettoyé avec cette méthode.

Quelle que soit la méthode utilisée pour le nettoyage, attendez que le masque soit propre et sec avant de l'équiper d'un nouveau filtre avant utilisation.

	N° de lot :	
3 1700864 1600510	Performances Si-Mask™ Suivant note interministérielle du 29 mars 2020 et AFNOR Spec S76-001 V1.10	
Testé par le laboratoire ICARE Rapport d'essai N°04826Y-3A	Efficacité de filtration des particules de 3µm	Respirabilité
		Valeurs Critères
<input checked="" type="checkbox"/>	Masque UNS 1	> 90 %
<input checked="" type="checkbox"/>	Masque UNS 2	> 70 %
		13,4 Pa.cm²
		< 60 Pa.cm ²
		< 60 Pa.cm ²
STERNE SAS Zac du MIN - 84300 Cavaillon - FR si-mask@sterne-elastomere.com 		

Avant la première utilisation :

<p>1</p>  <p>Inspectez le masque, vérifiez la présence de tous les composants.</p>	<p>2</p>  <p>Nettoyez les pièces avant la 1^{ère} utilisation suivant la méthode 3 en page 5/8.</p>	<p>3</p>  <p>Munissez-vous d'un filtre neuf et non abimé.</p>
---	---	---



Avant et après chaque utilisation ou manipulation :

<p>1</p>  <p>Assurez vous d'avoir les mains propres et sèches avant et après toute manipulation du masque</p>	<p>2</p>  <p>Nettoyez les pièces suivant une des méthodes décrites en page 5/8.</p>	<p>3</p>  <p>Jetez le filtre usagé. Montez un filtre neuf et non abimé.</p>
--	--	--

Mise en place des sangles :

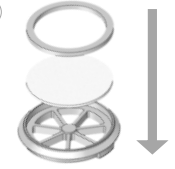
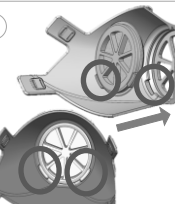
Quel que soit le kit de sangles utilisé, chaque extrémité des sangles se monte dans une bride de la manière suivante :

- Prenez une extrémité de la sangle. Passez la dans la fente la plus à l'extérieur de la bride.
- L'extrémité de la sangle est maintenant à l'intérieur de la bride. Sans vriller, ni boucler la sangle, passez cette extrémité dans la seconde fente de la bride. Répétez l'opération sur toutes les brides.

 <p>Montage kit « tour de tête »</p>	 <p>Montage kit « tour d'oreille »</p>
--	---

LE CHOIX DU MONTAGE DES SANGLES RESTE À L'APPRÉCIATION ET AU CONFORT DE L'UTILISATEUR. AFIN DE FONCTIONNER CORRECTEMENT, LE MASQUE DOIT PARFAITEMENT ÊTRE AJUSTÉ ET PERMETTRE LE PASSAGE DE L'AIR SEULEMENT PAR LE FILTRE. NOUS AVONS TESTÉ LE PORT DU MASQUE DURANT 4 HEURES ÉQUIPÉ DES 2 KITS.

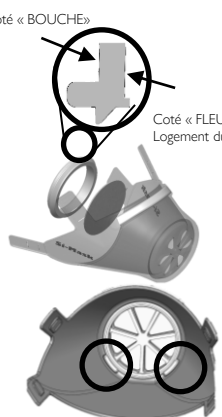
Utilisation du kit porte-filtre translucide : (recommandé pour les filtres coton Si-Mask™)

<p>1</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Posez le porte filtre coté détrompeur sur une surface propre, sèche et plane.2. Déposez dans le porte filtre le nouveau coton démaillant (filtre)3. Déposez la rondelle bloque-filtre au dessus du filtre.4. Appuyez sur la rondelle afin de bloquer le filtre5. Vérifiez le positionnement et le maintien du filtre avant utilisation.
<p>2</p> 	<ol style="list-style-type: none">6. Positionnez l'ensemble dans le masque Si-Mask™ en respectant le sens de montage et la position des détrompeurs.7. Appuyez fortement sur la rondelle afin de la rendre solidaire au masque.8. Vérifiez le bon montage de l'ensemble en inspectant visuellement le montage. Si le filtre est mal positionné, recommencez le montage.

Utilisation de la rondelle bloque-filtre grise : (pour filtres Ø64 en cours de développement)

Coté « BOUCHE »

Coté « FLEUR »
Logement du filtre






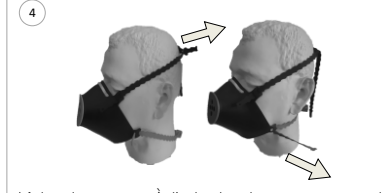
1. Prenez le masque, déposez le sur la face avant de manière à ce qu'il tienne verticalement. Enlevez la rondelle bloque-filtre et enlevez tout filtre usagé si applicable. Jetez le filtre usagé dans une poubelle. Une fois les pièces propres et sèches, ajoutez un nouveau filtre dans la rondelle bloque-filtre. Le filtre doit se monter sans forcer, et dans le logement prévu à cet effet.
2. Une fois le filtre mis en place dans la rondelle bloque-filtre grise, positionnez l'ensemble dans le masque en respectant le sens de montage et la position des détrompeurs. Une fois correctement positionnée, appuyez fortement sur la rondelle afin de la rendre solidaire au masque. Vérifiez le bon montage de l'ensemble en inspectant visuellement le montage. Si le filtre est mal positionné, recommencez le montage.


LES 2 RONDELLES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES AVEC LES FILTRES COTON. LE KIT PORTE-FILTRE (TRANSLUCIDE) PERMET D'AUTOCENTRER LE FILTRE ET AINSI UN MONTAGE ET DÉMONTAGE RAPIDE EN TOUTE SÉCURITÉ. LA RONDELLE BLOQUE FILTRE (GRISE) PERMET UN BON MAINTIEN DU FILTRE COTON, MAIS DEMANDE DE LA DEXTÉRITÉ POUR LE CENTRAGE.

Mise en place de Si-Mask™ avec les sangles « tour de tête » :

Avant de continuer, pour ce cas, assurez vous d'avoir monté le kit de sangle « tour de tête » comme le décrit la page 5. Pour être efficace, le masque Si-Mask™ doit être correctement utilisé. Pour cela, il est conseillé de le porter sur une peau nue et de suivre les instructions suivantes pour chaque mise en place du masque :



<p>1</p>  <p>Vérifiez la présence du filtre. Placez la sangle basse autour du cou. Ne pas la serrer pour le moment.</p>	<p>2</p>  <p>À l'aide de la main gauche, positionnez la partie inférieure du masque sous le menton et le maintien nasal. Une fois bien en place, ajustez à l'aide de l'index et du pouce la barrette nasale. Maintenez le masque.</p>
--	--

<p>3</p>  <p>À l'aide de la main droite, passez les sangles hautes sur le sommet du crâne, tout en maintenant le masque de la main gauche.</p>	<p>4</p>  <p>Lâchez le masque. À l'aide des deux mains, tirez chaque extrémité des sangles au sommet du crâne afin de serrer le haut du masque. Tirez ensuite chaque extrémité des sangles basses afin d'ajuster le bas du masque. Ajustez pour finir la barrette nasale.</p>
---	--


<p>5</p>  <p>Afin de vérifier le bon positionnement du masque, bouchez l'entrée d'air avec la paume de votre main. Inspirez et expirez de manière habituelle une fois puis retirez la main. Si l'air passe, ajustez de nouveau votre masque.</p>

Mise en place de Si-Mask™ avec les sangles « tour d'oreille » :

Avant de continuer, pour ce cas, assurez vous d'avoir monté le kit de sangle « tour d'oreille » comme le décrit la page 5. Pour être efficace, le masque Si-Mask™ doit être correctement utilisé. Pour cela, il est conseillé de le porter sur une peau nue et de suivre les instructions suivantes pour chaque mise en place du masque :

<p>1</p>  <p>Vérifiez la présence du filtre. Placez une des boucles formées par les sangles autour d'une oreille. Ne pas la serrer pour le moment.</p>	<p>2</p>  <p>À l'aide de la main droite, positionnez le masque sous le menton et sur le nez. La barrette nasale doit être positionnée sur le nez. Une fois bien en place, n'ajustez pas la barrette nasale pour le moment. Maintenez le masque.</p>
---	--

<p>3</p>  <p>À l'aide de la main gauche, placez l'autre boucle autour de l'oreille non équipée</p>	<p>4</p>  <p>Lâchez le masque. Ajustez à l'aide de l'index et du pouce la barrette nasale.</p>
---	---

<p>5</p>  <p>Afin de vérifier le bon positionnement du masque, bouchez l'entrée d'air avec la paume de votre main. Inspirez et expirez de manière habituelle une fois puis retirez la main. Si l'air passe, enlevez le masque, tirez les sangles et recommencez au point 1 de la mise en place. Une fois le masque installé, lavez-vous les mains à l'aide de gel hydroalcoolique ou de l'eau et du savon.</p>
